


Stanice IDEXX VetLab Station

Stručný návod k použití

Další informace o používání pracovní stanice IDEXX VetLab* Station (například přidávání testů ke zpracování, trendy a přiřazování výsledků, zadávání výsledků testů SNAP* atd.) naleznete na adrese idexx.com/product-info anebo learn.idexx.com.

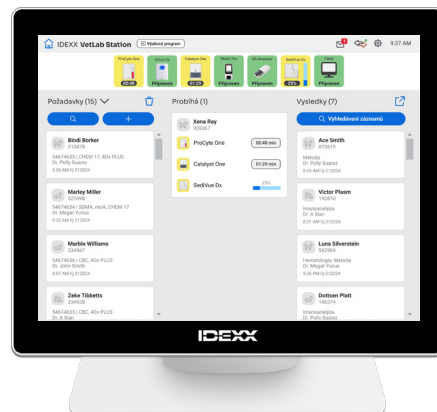

Procházení domovské obrazovky

Stavové ikony přístrojů

Barevně rozlišené ikony ukazují, které přístroje pracují anebo jsou k dispozici.

- **Zelená (připraven)** – připojen a komunikuje
- **Žlutá (zanepřážděný/pohotovostní režim)** – v provozu nebo v pohotovostním režimu
- **Šedá (odpojen)** – spojení bylo ztraceno.
- **Červená (upozornění)** – vyskytl se problém – klepnutím na ikonu zobrazíte další informace.

Požadavky nebo Seznam přehledů

Pokud máte integrovaný informační systém praxe (PIMS), můžete upravit Nastavení úvodní nabídky tak, aby zahrnovalo Seznam čekajících na vyřízení a/nebo Seznam přehledů; po povolení můžete pomocí rozbalovací šipky vybrat, který z těchto seznamů chcete zobrazit:

- **Seznam Požadavky** – zobrazíte si seznam pacientů, kteří mají otevřené požadavky v integrovaném systému PIMS, a klepnutím na jméno pacienta zahajete zpracování vzorku. K odstranění vybraných pacientů ze seznamu Požadavky můžete použít také ikonu Odstranit.
- **Seznam přehledů** – zobrazíte si seznam pacientů, kteří byli zaregistrováni na klinice prostřednictvím integrovaného systému PIMS, a klepnutím na jméno pacienta spustíte zpracování vzorku.

Tlačítko Vyhledávání

Klepnutím vyhledejte konkrétního pacienta v Požadavky nebo v Seznamu přehledů (podle toho, který se zobrazuje) a spusťte zpracování vzorku.

Tlačítko Přidat/analyzovat vzorek

Klepnutím na toto tlačítko ručně zadáte informace o pacientovi a zahájíte zpracování vzorku.

V seznamu Probíhá

se podívejte, které testy jsou aktuálně spuštěny, čekají na spuštění nebo vyžadují akci.

Centrum zpráv

Klepnutím zobrazíte oznámení zařízení IDEXX.

Indikátor IDEXX SmartService

Barva bodu označuje stav připojení služby IDEXX SmartService* Solutions:

- **Zelená** – připojeno
- **Žlutá** – probíhá připojování
- **Šedá** – vypnuto
- **Červená** – nepřipojeno

Ikona Ozubené kolo

Klepnutím otevřete nabídku, kde můžete přistupovat k obrazovkám přístroje, přizpůsobit si nastavení, získat nápovědu, zobrazit zprávy nebo vypnout systém.

Ikona Zobrazit všechny výsledky

Klepnutím na zobrazíte celou historii výsledků interní diagnostiky podle pacientů.

Tlačítko Vyhledávání záznamů

Vyhledejte konkrétní záznam pacienta.

Seznam výsledků

Podívejte se na seznam interních výsledků pacientů vygenerovaných za posledních 7 dní. Klepnutím vyberte pacienta a prohlédněte si nebo vytiskněte jeho výsledky.

Zahájení zpracování vzorku s integrovaným systémem PIMS

1. Klepněte na požadovaného pacienta v seznamu **Požadavky** nebo **Přehledy** v úvodní nabídce, nebo klepněte na  a vyhledejte pacienta v seznamu **Požadavky** nebo **Přehledy**.
2. Vyberte požadované nástroje a klepněte na **Spustit**.

Spuštění vzorku přímo na stanici IDEXX VetLab Station

1. Klepněte na tlačítko  **Analyzovat vzorek** nebo  v úvodní nabídce.
2. Vyberte/zadejte informace o pacientovi:
 - + **Pokud jde o nového pacienta**, klepněte na **Přidat nového pacienta**, zadejte informace o pacientovi/klientovi a klepněte na **Další**. Poté potvrďte nebo upřesněte informace o pacientovi či ordinaci, zvolte požadovaný přístroj (přístroje) a klepněte na **Spustit**.
 - + **Pokud se jedná o existujícího pacienta**, vyhledejte jej klepnutím na pole **Pacient**, **Příjmení** nebo **ID klienta** a poté začněte zadávat příslušné informace. Následně klepnutím zvolte požadovaného pacienta ze seznamu a klepněte na **Další**. Poté potvrďte nebo upřesněte informace o pacientovi či ordinaci, zvolte požadovaný přístroj (přístroje) a klepněte na **Spustit**.
 - + **Pokud jde o akutní případ**, Klepněte na **Stat**. Vyberte **Druh** a **Věkové rozmezí**. Systém automaticky zadá jedinečné časové razítko k identifikaci pacienta (které lze později použít při novém přiřazení výsledků testu). Klepněte na **Další**.
3. Vyberte požadované nástroje a klepněte na **Spustit**.

Zadávání nebo úprava výsledků ručního testu SNAP

Chcete-li zadat výsledky ručního testu SNAP:

1. Klepněte na **SNAP** v seznamu Probíhá, nebo klepněte na **Zadat výsledky** v dialogovém okně Časovač SNAP dokončen.
2. Klepněte na obrázek, který odpovídá oknu výsledků testu SNAP.
3. (Volitelné) Klepněte na kartu **Komentář** a potom zadejte své uživatelské ID a komentář k tomuto výsledku testu.
4. Klepněte na **Uložit**.

Chcete-li upravit výsledky testu SNAP:

1. Na obrazovce výsledků klepněte na **Správa výsledků**.
2. Klepněte na **Upravit ruční výsledky** a vyberte výsledek testu SNAP, který chcete upravit.
3. Provedte změny a klepněte na **Uložit**.

Ruční zadávání vlastností fyzikálního a chemického vyšetření moči

Chcete-li přidat chemické a fyzikální vlastnosti moči během běhu:

1. Zahajte analýzu moči.
2. Až budete vyzváni k výběru požadovaných ikon nástroje, klepněte na ikonu **Ruční UA** a vyberte metodu odběru, barvu a čistotu vzorku.
3. Zadejte specifickou hmotnost vzorku.
4. Klepněte na barvu, která odpovídá pH vzorku.
5. Pokud jsou všechny chemické složky normální, klepněte na **Nastavit vše na Negativní/Normální**; v opačném případě uveďte příslušné výsledky. (Pokud změníte pouze některé výsledky, po dokončení klepněte na **Další**.)
6. Klepnutím zadejte komentáře **Hotovo**.

Chcete-li upravit vlastnosti ručního UA:

1. Na obrazovce výsledků klepněte na **Správa výsledků**.
2. Klepněte na **Upravit zadané výsledky ručně** a vyberte k úpravě Výsledky UA ručně.
3. Provedte změny a klepněte na **Uložit**.

Prohlížení a tisk výsledků

1. Provedte jeden z následujících postupů:
 - + Chcete-li zobrazit výsledky ihned po dokončení cyklu, klepněte na zprávu oznamující Nové výsledky.
 - + Chcete-li zobrazit výsledky získané za posledních 7 dní, klepněte na jméno pacienta v seznamu Výsledky na obrazovce Úvodní nabídka.
 - + Zobrazení historie výsledků:
 - V části Výsledky na obrazovce Úvodní nabídka klepněte na položku **Vyhledávání záznamů** nebo na , vyhledejte a vyberte požadovaného pacienta a klepněte na **Zobrazit**.
 - Na kterékoli jiné obrazovce než na obrazovce Úvodní nabídka klepněte na , vyhledejte a vyberte požadovaného pacienta a klepněte na **Zobrazit**.
2. Klepněte na kartu, která obsahuje požadované výsledky.
3. Klepnutím  vytisknete souhrnnou zprávu o všech výsledcích testu z vybrané karty.

Týdenní údržba

IDEXX doporučuje restartovat systém každý týden.

1. Klepněte na  a potom klepněte na **Vypnout**.
2. Klepněte na **Vypnout** nebo **Restartovat**.

Úprava nastavení

Stanici IDEXX VetLab Station si můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovala potřebám vaší praxe. Klepněte na  a poté klepněte na **Nastavení**.