


# Stanice IDEXX VetLab Station

## Stručný návod k použití

Další informace o používání pracovní stanice IDEXX VetLab<sup>®</sup> Station (například přidávání testů ke zpracování, trendy a přiřazování výsledků, zadávání výsledků testů SNAP<sup>®</sup> atd.) naleznete na adrese [idexx.com/product-info](https://idexx.com/product-info) nebo [learn.idexx.com](https://learn.idexx.com).

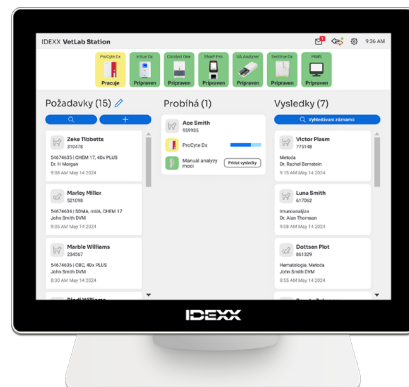


## Procházení domovské obrazovky

### Stavové ikony přístrojů

Barevně rozlišené ikony ukazují, které přístroje pracují nebo jsou k dispozici.

- **Zelená (připraven)** – připojen a komunikuje
- **Žlutá (zanepřázdňen/pohotovostní režim)** – v provozu nebo v pohotovostním režimu
- **Šedá (odpojen)** – spojení bylo ztraceno.
- **Červená (upozornění)** – vyskytl se problém – klepnutím na ikonu zobrazíte další informace.

### Centrum zpráv


Klepnutím  zobrazíte oznámení zařízení IDEXX.

### Indikátor IDEXX SmartService

Barva bodu označuje stav připojení služby IDEXX SmartService<sup>®</sup> Solutions:

- **Zelená** – připojeno
- **Žlutá** – probíhá připojování
- **Šedá** – vypnuto
- **Červená** – nepřipojeno

### Ikona Ozubené kolo


Klepnutím  otevřete nabídku, kde můžete přistupovat k obrazovkám přístroje, přizpůsobit si nastavení, získat nápovědu, zobrazit zprávy nebo vypnout systém.

### Elipsa (...)

Klepnutím na „...“ zobrazíte možnosti zobrazení seznamu sčítání nebo odstranění požadavků ze seznamu nevyřízených.

### Seznam Nevyřízené

Podívejte se, kteří pacienti mají otevřené žádanky v integrovaném systému správy informací o praxi (PIMS).

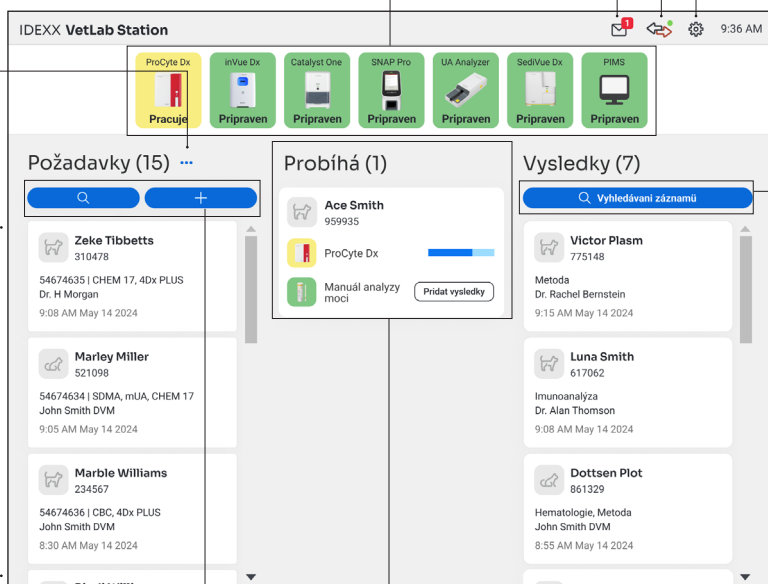

### Vyhledávání záznamů

Vyhledávání záznamů pacientů.

### Výsledky

Podívejte se na seznam interních výsledků pacientů vygenerovaných za posledních 7 dní. Klepnutím vyberte pacienta a prohlédněte si nebo vytiskněte jeho výsledky.


### Tlačítka Hledat a Přidat

Klepnutím na **Vyhledat** vyhledejte pacienta v seznamu Nevyřízené. Klepnutím na **Přidat** zadejte ručně informace o pacientovi.

### V oblasti Proces

Podívejte se, které testy jsou aktuálně spuštěny, čekají na spuštění nebo vyžadují akci.

## Zahájení zpracování vzorku s integrovaným PIMS

1. Klepněte na požadovaného pacienta v seznamu **Nevyřízené** nebo **Census** na domovské obrazovce nebo klepněte na  a vyhledejte pacienta v seznamu **Nevyřízené**
2. Vyberte požadované nástroje a klepněte na **Spustit**.

## Spuštění vzorku přímo na stanici IDEXX VetLab

Klepněte na  domovskou obrazovku a potom:

*Pokud se jedná o nového pacienta:*

1. Klepněte na **Přidat nového pacienta**, zadejte informace o pacientovi/klientovi a klepněte na **Další**.
2. Potvrďte nebo upřesněte informace o pacientovi či ordinaci, zvolte ikonu požadovaného přístroje (přístrojů) a klepněte na **Spustit**.

*Pokud se jedná o stávajícího pacienta:*

1. Klepněte na **Pacient, Příjmení** nebo **ID klienta** a začněte zapisovat příslušné informace. Následně klepnutím zvolte požadovaného pacienta ze seznamu a klepněte na **Další**.
2. Potvrďte nebo upřesněte informace o pacientovi či ordinaci, zvolte ikonu požadovaného přístroje (přístrojů) a klepněte na **Spustit**.

*Pokud jde o akutního pacienta:*

1. Klepněte na **Statistika**.
2. Vyberte **Druh** a **Věkové rozmezí**. Systém automaticky zadá jedinečné časové razítko k identifikaci pacienta (které lze později použít při novém přiřazení výsledků testu).
3. Klepněte na **Další**.
4. Vyberte požadované nástroje a klepněte na **Spustit**.

## Zadávání nebo úprava výsledků ručního testu SNAP

**Chcete-li zadat výsledky ručního testu SNAP:**

1. Klepněte na **SNAP** v oblasti Probíhá nebo klepněte na **Zadat výsledky** v dialogovém okně Časovač SNAP dokončen.
2. Klepněte na obrázek, který odpovídá oknu výsledků testu SNAP.
3. (Volitelné) Klepněte na kartu **Komentář** a potom zadejte své uživatelské ID a komentář k tomuto výsledku testu.
4. Klepněte na **Uložit**.

**Chcete-li upravit výsledky testu SNAP:**

1. Na obrazovce výsledků klepněte na **Správa výsledků**.
2. Klepněte na **Upravit ruční výsledky** a vyberte výsledek testu SNAP, který chcete upravit.
3. Provedte změny a klepněte na **Uložit**.

## Ruční zadávání vlastností fyzikálního a chemického vyšetření moči



**Chcete-li přidat chemické a fyzikální vlastnosti moči během běhu:**

1. Zahajte analýzu moči.
2. Až budete vyzváni k výběru požadovaných ikon nástroje, klepněte na ikonu **Ruční UA** a vyberte metodu odběru, barvu a čistotu vzorku.
3. Zadejte specifickou hmotnost vzorku.
4. Klepněte na barvu, která odpovídá pH vzorku.
5. Pokud jsou všechny chemické složky normální, klepněte na **Nastavit vše na Negativní/Normální**, v opačném případě uveďte příslušné výsledky. (Pokud změníte pouze některé výsledky, po dokončení klepněte na **Další**.)
6. Klepnutím zadejte komentář **Hotovo**.

**Chcete-li upravit vlastnosti ručního UA:**


1. Na obrazovce výsledků klepněte na **Správa výsledků**.
2. Klepněte na **Upravit zadané výsledky ručně** a vyberte k úpravě Výsledky UA ručně.
3. Provedte změny a klepněte na **Uložit**.

## Prohlížení a tisk výsledků


1. Provedte jeden z následujících postupů:
  - + Klepněte na pacienta v seznamu výsledků na domovské obrazovce.
  - + Klepněte na zprávu upozornění nových výsledků.
  - + V části Výsledky na domovské obrazovce klepněte na  **Vyhledávání záznamů**, vyhledejte a vyberte požadovaného pacienta a klepněte na **Zobrazit**.
2. Klepněte na kartu, která obsahuje požadované výsledky.
3. Klepnutím  vytisknete souhrnnou zprávu o všech výsledcích testu z vybrané karty.

## Týdenní údržba

IDEXX doporučuje restartovat systém každý týden.

1. Klepněte na  a potom klepněte na **Vypnout**.
2. Klepněte na **Vypnout** nebo **Restartovat**.

## Úprava nastavení

Stanice IDEXX VetLab Station si můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovala potřebám vaší praxe. Klepněte na  a potom klepněte na **Nastavení**.