

Catalyst Pankreatická lipáza algoritmus



Klinické příznaky naznačující pankreatitidu

(snížená chuť k jídlu/anorexie, zvracení, bolest břicha, dehydratace, hypovolémie, slabost/letargie)



Anamnéza

(souběžná onemocnění, aktuální medikace, plemenné predispozice, požití nezvyklého jídla [pes], dieta s vysokým obsahem tuku [pes])

Klinické vyšetření

Výrazné klinické příznaky

(systémové komplikace, celková slabost)

Intermitentní nebo chronické klinické příznaky

Hematologie, biochemie, Catalyst Pankreatická lipáza, vyšetření moči



Zobrazovací diagnostika

(vyloučení cizího tělesa nebo jiných chirurgických indikací, zhodnocení změn kompatibilních s pankreatitidou a nálezů jiných onemocnění)

Mírné klinické příznaky

(bez podezřelé anamnézy, bez predisponujících/ již existujících okolností nebo medikace)

Zvažte nutnost dalších diagnostických kroků (zavíší na případě)

Podpůrná léčba a dieta

Pankreatická lipáza

Pes ≥ 400 U/l
Kočka ≥ 8.8 U/l

Pankreatická lipáza

Pes 201–399 U/l
Kočka 4.5–8.7 U/l

Pankreatická lipáza

Pes ≤ 200 U/l
Kočka ≤ 4.4 U/l

Konzistentní s pankreatitidou*


Pankreatitida možná

Pankreatitida nepravděpodobná

*Jestliže jsou přítomny abnormality naznačující jiné onemocnění, pak je pravděpodobně pankreas také postižen, ale není výhradní příčinou klinických příznaků (cizí těleso, ledviny, játra, endokrinopatie).

Interpretace výsledků Catalyst Pankreatické lipázy

Proveďte test Catalyst Pankreatická lipáza, jestliže jsou přítomny klinické příznaky[†] pankreatitidy nebo je-li lipáza v profilu chem 17 významně zvýšená[‡]

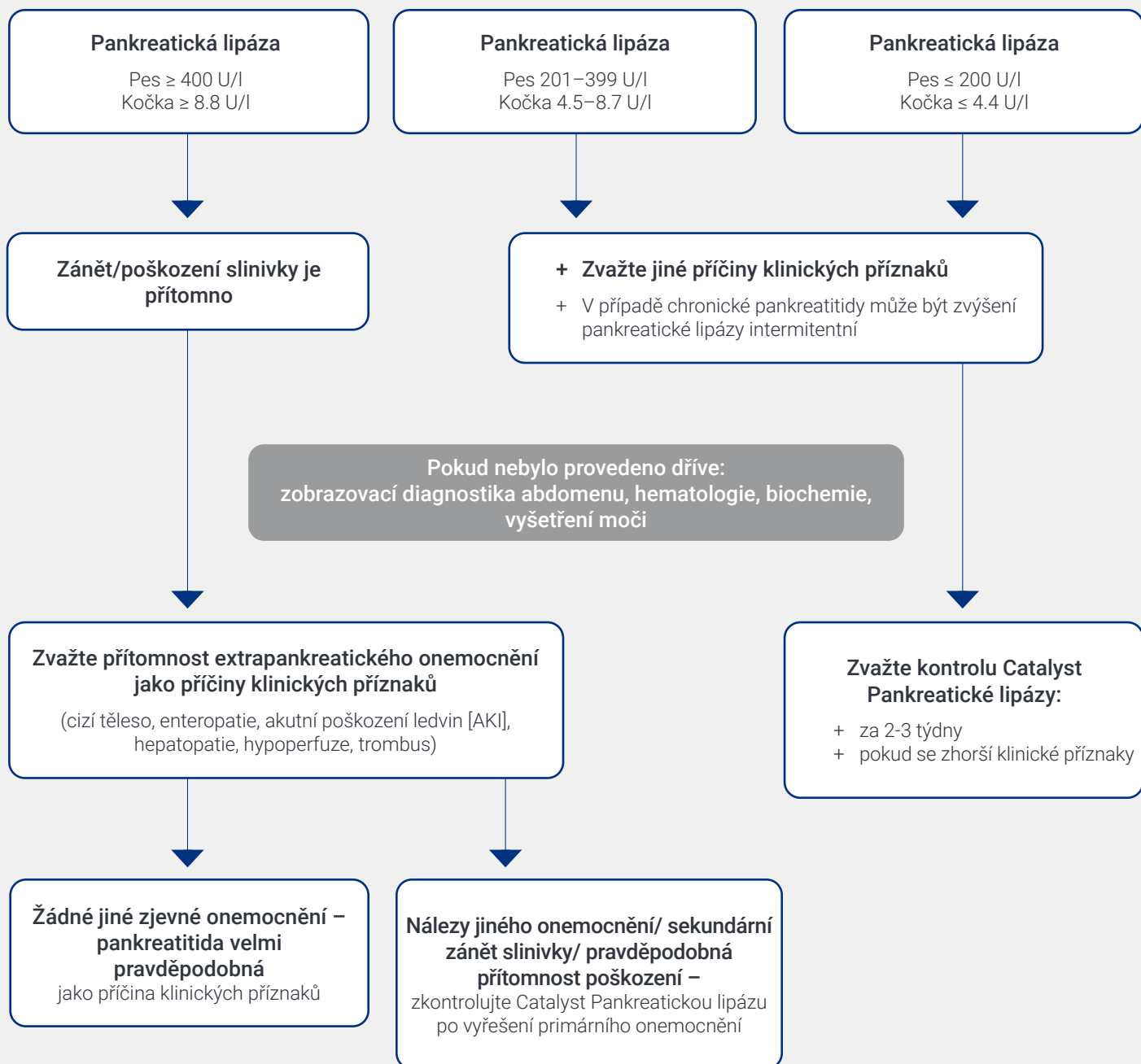

[†]Klinické příznaky pankreatitidy mohou být nezřetelné a nespecifické, zejména v případě chronické pankreatitidy.

[‡]Přibližně 3x nad referenčním rozmezím.